

FECASOL

Roztwór do badania kału metodą flotacji

Skład: roztwór saletry chilijskiej

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.

Ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

WYŁĄCZNIE DO CELÓW DIAGNOSTYCZNYCH

650 ml

Wytwórca:

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14

66-400 Gorzów Wlkp.

Instrukcja

Jak użyć Fecalyzer do zebrania próbki kału?



1. Unieś wieczko i wyjmij zieloną wkładkę.



2. Wciśnij wąski koniec wkładki w kał, obracając w prawo i lewo pobierz próbkę do badań (jeżeli badany kał jest luźny, nabierz go do wąskiej końcówki wkładki). Nie należy na siłę ubijać kału w zagłębieniu wkładki).



3. Włóż z powrotem zieloną wkładkę do pojemnika i zamknij wieczkiem.

W przypadku dłuższego przechowywania trzymać w temp. 4-8 °C.

Nie zamrażać próbki!